


使用方法

1. 専用ポケットつきブラジャーを装着し、プレストフォームとポンプセットを準備します(プレストフォームとポンプセットはまだ接続しません)。




2. ポンプ(表面:製品内容③)を反対側のブラストラップに挟み、両手が自由になるようにします。このときチューブは体の中心側に出すようにします。装着する側のブラストラップを肩から外します。

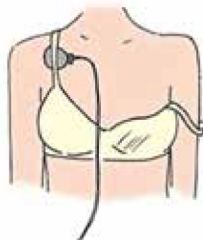


3. 親指と人差し指ですり合わせるようにして、プレストフォームの開口部(①)を開けます。挿入管(⑥)を開口部に挿入しプレストフォームとポンプセットを接続します。このときお買い上げ時に差し込まれているタグ(②)は取ってください。



4. プレストフォームをブラジャーのカップに入れます。挿入管がプレストフォーム開口部に完全に挿入されていることを確認してください。(表面:【挿入イメージ】参照)

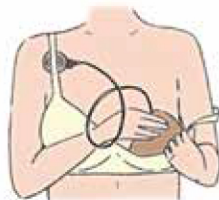

5. ブラジーストラップを正しい位置に戻します。

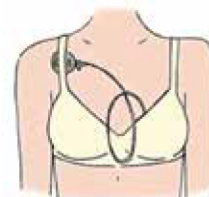

6. ポンプ(③)を握ってプレストフォームに空気を入れ、ボリュームを調整します。空気を抜く場合は、バルブ(④)のボタンを押しながら、プレストフォームをやさしく押しします。



7. ボリューム調整が終わったら、プレストフォーム開口部から挿入管をゆっくりと抜きます。このとき、挿入管にシリコンオイルが付着する場合があります。オイルがブラジャーや衣服につかないように注意してください。



8. プレストフォームをカップから取り出し、ブラジャーのポケットに入れ、ストラップを正しい位置に戻します。



【注意】プレストフォームの空気を出し入れする際は、挿入管を開口部に奥までしっかりと挿入してください。